

98. Wszechświat umysłu


Trening z tą planszą polega na uzyskaniu jak najmniejszego żółtego, galaretowatego wypełnienia wewnątrz pierścieni - rytm promowany. Pierścienie (niebieskie i czerwone) powinny być rozłożone - rytm hamowany. Cały układ pierścieni powinien kręcić się jak najwolniej - drugi rytm hamowany (Beta2).

Wynik dobry



- niebieskie pierścienie są rozchylone
- pierścienie wirują szybko
- żółta masa jest niewidoczna

Wynik zły

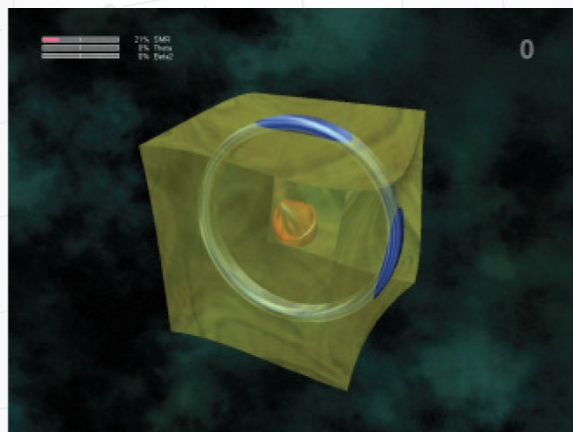

- niebieskie pierścienie są złożone tworząc okrąg
- pierścienie wirują wolno
- żółta masa zakrywa pierścienie